

**هدف:** کیت های یکبار مصرف وصل و جداسازی فیستولا برای مراقبت بهتر از دسترسی عروقی در زمان وصل و جداسازی بیمار همودیالیزی کاربرد دارد. بسته بندی کیت به صورت دو نیم ست جداگانه وصل و جداسازی بوده که از یک سمت به هم متصل می باشند.

### مدل: کیت وصل و جداسازی فیستولا همودیالیزی (Fistula Kit) دستورالعمل استفاده:

#### نیم ست وصل فیستولا:

- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.
- کیت را در محلی صاف و مسطح به گونه ای قرار دهید تا نیم ست وصل (با شماره ۱ روی لیبل مشخص شده است) بالا قرار گیرد.
- بسته بندی کیت را از سمت نیم ست وصل به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.
- بند سبز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی را مطابق با توضیحات ذیل استفاده نمایید.
- دستکش ها را بپوشید.
- دروشیت را به نحوی که لایه جاذب بالا و لایه ضد آب پایین باشد، زیر دست بیمار قرار دهید.
- از پد الکلی برای ضد عفونی کردن محل دسترسی عروقی استفاده کنید.
- از چسب ها برای ثابت کردن دروشیت، سوزن های فیستولا و ست همودیالیزی استفاده کنید.
- از سرنگ ۲،۵ سی سی در صورت نیاز برای کشیدن و تزریق هپارین استفاده کنید.
- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

#### نیم ست جداسازی فیستولا:

- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.
- بسته بندی نیم ست جداسازی را به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.
- بند قرمز رنگ دور نیم ست را باز کنید، اقلام مصرفی را مطابق با توضیحات ذیل استفاده نمایید.
- دستکش ها را بپوشید.
- از مقدار کافی پد استریل برای بند آوردن خون بعد از کشیدن سوزن های فیستولا استفاده کنید.
- بعد از بند آمدن خون محل دسترسی، از پد استریل برای پانسمان و از چسب برای ثابت کردن آن استفاده کنید.

**نکته:** در صورتی که کیت خریداری شده از مدل های دارای پانسمان نقره باشد، از آن برای پانسمان محل دسترسی به جای چسب و پد استریل استفاده نمایید.

#### موارد منع مصرف:

برخی اقلام این محصول استریل شده با گاز اتیلن اکساید است و برای بیمارانی که به ETO حساسیت دارند توصیه نمی شوند.

#### احتیاط:

- در صورت پاره شدن، صدمه دیدن یا خیس شدن بسته بندی کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.
  - در صورت اتمام تاریخ انقضاء کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.
- شرایط نگهداری:**
- در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب، به دور از نور خورشید و دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD07	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	1 of 4

### هشدار:

- ۱- شرکت مدوی طب پویان در قبال پیامدهایی که ممکن است بعد از تحویل کالا برای محصول پیش آید، مانند حمل و نقل، انبارش و نگهداری و همچنین استفاده از محصول در شرایطی غیر از شرایط ذکر شده در این دفترچه راهنما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- ۲- تاریخ انقضاء در مورد محصولات که به درستی نگهداری شده کاربرد دارد.
- ۳- بلافاصله پس از استفاده به روش مناسب (زباله های بیمارستانی و بر اساس مقررات بهداشت محیط) دور انداخته شود.
- ۴- این محصول برای هدفی غیر از همودیالیز کاربرد ندارد.

### علائم:

 35°C 5°C	نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد		تاریخ انقضاء
	یکبار مصرف		آدرس تولیدکننده
	احتیاط		قبل از استفاده به دستورالعمل مراجعه شود
	لات نامبر		چنانچه بسته بندی آسیب دیده از مصرف خودداری کنید

### آدرس سازنده:

#### مدوی طب پویان

آدرس: تهران، سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، نبش کوچه میرزایی، پلاک ۴۴ طبقه اول

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بوستان دوم

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۴۰۰۱

وبسایت: [www.medwayteb.com](http://www.medwayteb.com)

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD07	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	2 of 4

ترتیب استفاده از اقلام کیت

# CONNECTION Set

## کیت وصل-فیستولا

۱

دستکش معاینه پزشکی  
۱ جفت




۳

پد الکلی  
۲ عدد




۲

دروشیت  
۱ عدد

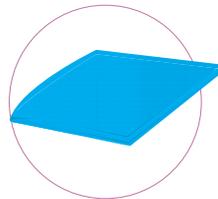


۵

سرنگ ۲.۵ سی سی  
۱ عدد

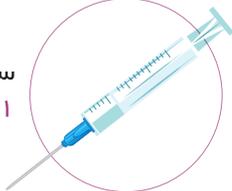

۴

چسب حصیری ۳\*۱۰  
۶ عدد

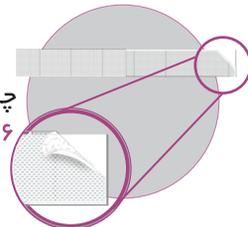


# DISCONNECTION Set

## کیت جداسازی-فیستولا KIT

۲

پد استریل  
۱ بسته

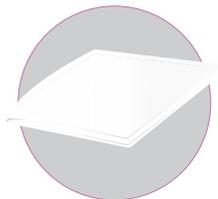


۱

دستکش معاینه پزشکی  
۱ جفت




۴

چسب حصیری ۱۰\*۳  
۲ عدد

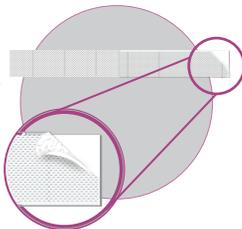

۳

چسب حصیری ۱۰\*۵  
۲ عدد

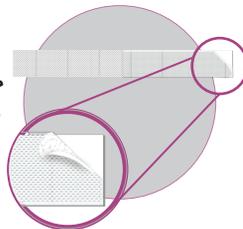

بانداز نقره دار فیستول  
1 x Nova Betafix AG



پانسمن نقره مدل  
1 x Nova Sovan AG

آپشنال