

درمانی، برای تخلیه مایع داخل هر یک از لوله های کنتر استفاده کنید.

۱۱- بیمار را طبق دستورالعمل همودیالیز به دستگاه وصل کنید.

۱۲- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

### نیم ست جداسازی کنتر:

۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.

۲- بسته بندی نیم ست جداسازی را به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.

۳- بند قرمز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی به ترتیبی که در هر کیت چیده شده، و با توجه به توضیحات ذیل استفاده شوند.

۴- دستکش ها را بپوشید.

۵- با سرنگ ۱۰ سی سی، شستشوی هر یک از لوله های کنتر را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام دهید.

۶- از سرنگ ۲,۵ سی سی برای کشیدن و تزریق هپارین به داخل هر یک از لوله های کنتر استفاده کنید

۷- از پد الکلی برای ضدعفونی هاب هر یک از لوله های شریانی و وریدی به صورت جدا از هم و به شکل دورانی استفاده کنید.

**نکته:** در صورتی که کیت خریداری شده از مدل های دارای پد نقره باشد، از آن برای پد محل دسترسی استفاده نمایید و با چسب فیکس کنید.

۸- از هپارین لاک برای پوشاندن انتهای محل اتصال کنتر استفاده کنید.

۹- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

**هدف:** کیت های یکبار مصرف وصل و جداسازی کنتر برای مراقبت بهتر از دسترسی عروقی در زمان وصل و جداسازی بیمار همودیالیزی کاربرد دارد. بسته بندی کیت به صورت دو نیم ست جداگانه وصل و جداسازی بوده که از یک سمت به هم متصل می باشند.

### مدل: کیت وصل و جداسازی کنتر همودیالیز (Catheter Kit)

#### دستورالعمل استفاده:

#### نیم ست وصل کنتر:

۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.

۲- کیت را در محلی صاف و مسطح به گونه ای قرار دهید تا نیم ست وصل (با شماره ۱ روی لیبل مشخص شده است) سمت بالا قرار گیرد.

۳- بسته بندی کیت را از سمت نیم ست وصل به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.

۴- بند سبز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی را مطابق توضیحات ذیل استفاده نمایید.

۵- دستکش ها را بپوشید.

۶- بسته بندی شان پرفوره را باز کرده و زیر کنتر به نحوی که لایه جاذب بالا و لایه ضد آب پایین باشد، قرار دهید.

۷- شان پرفوره را با چسب های حصیری بر روی بدن بیمار ثابت کنید.

۸- از پد الکلی برای ضدعفونی هاب هر یک از لوله های شریانی و وریدی به صورت جدا از هم و به شکل دورانی استفاده کنید.

۹- از سرنگ ۲,۵ سی سی در صورت نیاز برای کشیدن و تزریق هپارین استفاده کنید.

۱۰- از سرنگ ۵ سی سی با توجه به دستورالعمل مرکز

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD22	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	1 of 4

### موارد منع مصرف:

برخی اقلام این محصول استریل شده با گاز اتیلن اکساید است و برای بیمارانی که به ETO حساسیت دارند توصیه نمی شوند.

### احتیاط:

- ۱- در صورت پاره شدن، صدمه دیدن یا خیس شدن بسته بندی کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.
- ۲- در صورت اتمام تاریخ انقضاء کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.

### شرایط نگهداری:

در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب، به دور از نور خورشید و دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

### علائم:

	نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد		تاریخ انقضاء
	یکبار مصرف		آدرس تولیدکننده
	احتیاط		قبل از استفاده به دستورالعمل مراجعه شود
	لات نامبر		چنانچه بسته بندی آسیب دیده از مصرف خودداری کنید

### آدرس سازنده:

#### مدوی طب پویان

آدرس: تهران، سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، نبش کوچه میزایی، پلاک ۴۴ طبقه اول  
 آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بوستان دوم  
 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۴۰۰۱

وبسایت: [www.medwayteb.com](http://www.medwayteb.com)

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD22	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	2 of 4

ترتیب استفاده از اقلام کیت :

# CONNECTION Set

## کیت وصل-کنتر Catheter KIT

۲

شان پرفوره  
۱ عدد




۱

دستکش معاینه پزشکی  
۱ جفت



۴

چسب حصیری ۳\*۱۰  
۲ عدد

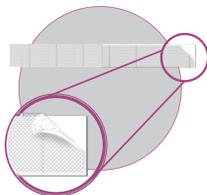

۳

پد الکلی  
۲ عدد



۶

سرنگ ۵ سی سی  
۲ عدد



۵

سرنگ ۲.۵ سی سی  
۱ عدد



# DISCONNECTION Set

## کیت جداسازی-کنتر Catheter KIT

۲

سرنگ ۱۰ سی سی  
عدد ۲



۱

دستکش معاینه پزشکی  
۱ جفت



۴

پد الکلی  
عدد ۲



۳

سرنگ ۲.۵ سی سی  
عدد ۲



۵

هیپارین لاک  
عدد ۲



پد نقره  
1 x Exit Pad AG

آپشنال